



CRW-Fall



discret et facile à porter (66x43x18 mm, 42g)
je protège mon utilisateur

- en lançant une **alarme volontaire** ou **automatique**.
- en détectant une **chute**.
- en me **localisant** dans l'établissement lors d'une alarme.
- en donnant sur demande ma **position** dans l'établissement.
- en transmettant la **présence de l'intervenant** auprès de moi.
- en lançant un appel d'**urgence** sur demande.
- en transmettant une alarme **si je ne suis plus porté** par mon utilisateur.
- en informant le personnel soignant que je ne suis plus dans la **zone de sécurité**.

J'informe que ma pile est à remplacer.

Je protège même lors de la toilette de mon utilisateur.

Je peux être porté en broche, en tour de cou, dans une poche.

J'assure la sécurité de mon porteur *en toute discrétion !*

Je fonctionne sur tous les réseaux IP-Care.



CRW-Fall



Chaque année, plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans chutent, et une personne sur 2 âgée de plus de 80 ans en est victime.

Ces risques sont présents à domicile mais aussi en établissement. Les risques de rechuter sont multipliés par 20 après la première chute, il faut pouvoir la détecter avec efficacité en équipant la personne d'un outil de détection fiable.

Il existe plusieurs types de chutes :

la chute dite lourde : perte de verticalité rapide associée à un choc,

la chute molle : lorsque la personne se retient (à un meuble, par exemple),

la chute syncopale : lors d'une perte de connaissance.



Le CRW-Fall détecte l'accélération (hauteur supérieure à 1 mètre), l'impact et l'angle (supérieur à 45 degrés). Parce qu'il subsiste un risque, même infime, qu'une chute ne soit pas détectée, nous recommandons à l'utilisateur en situation d'urgence d'utiliser aussi le bouton SOS.